


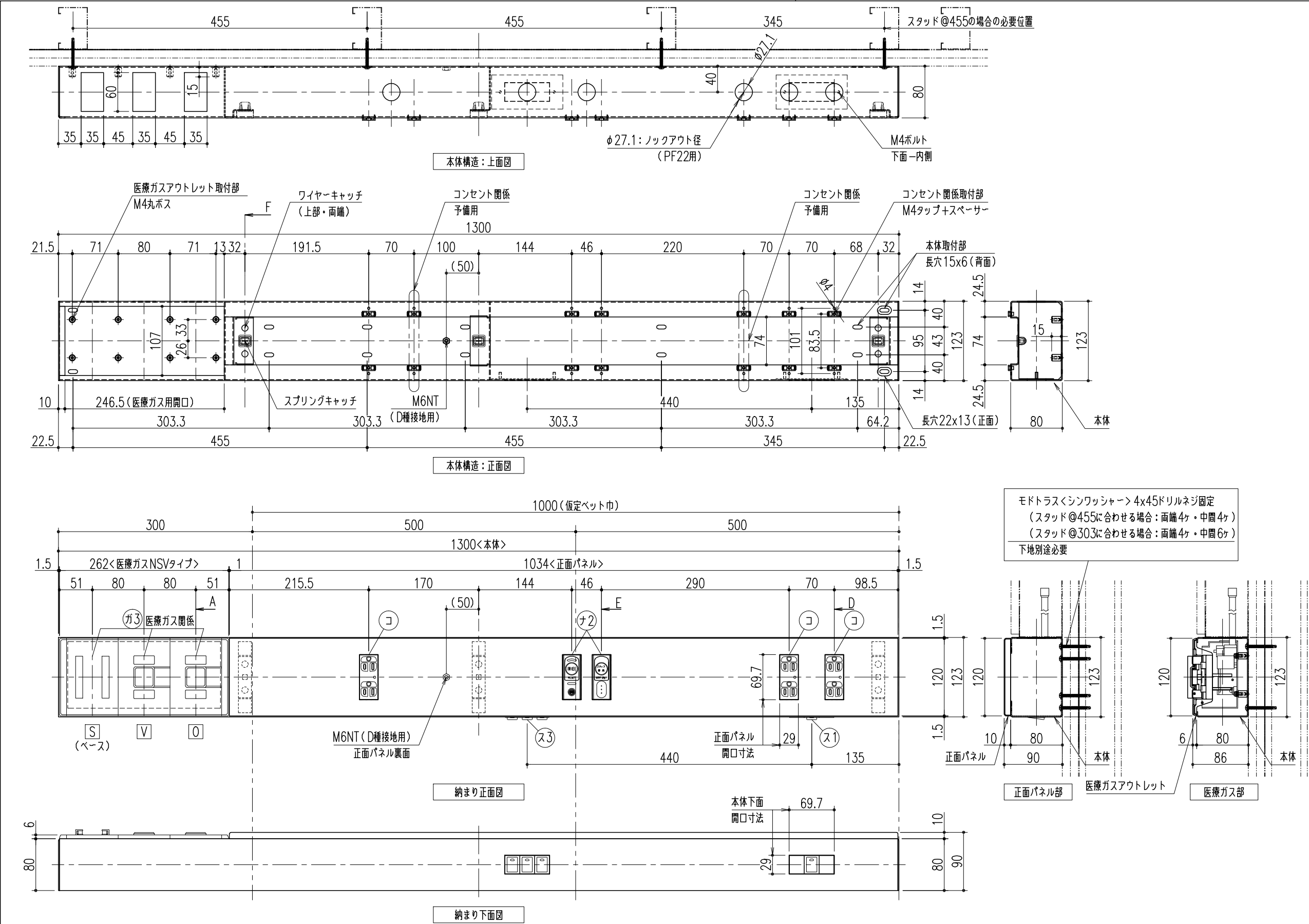

左側－医療ガス部：S V O（3ヶ）型
S・セントラルユニ製くNSVタイプ＞：スライドベース

材質：銅板製
本体：PL－1.6t ・ 正面パネル：PL－1.2t
表面処理：アクリル樹脂焼付塗装
色、艶：＜日塗工＞、＜分艶＞
物件毎に指定（単色のみ）※御指示下さい

■正面パネル、本体、のみ中部コーポレーションにて製作となります。



■医療ガス関係
※医療ガス取付部、M4丸ボス位置と開口サイズと仕様の確認が必要です。

■オプション
※予備用コンセント使用時の正面パネルは別製作になります。

■本体ロックアウト径
※φ27.1（PF22用）は御指示によりφ21.5（PF16用）他に対応可能です。

詳細図番		
DWC2000205		
DWC2000206		
DWC2000207		
○	対応 設備	個数
ガ3	医療ガス関係	一式
コ	医療コンセント	3ヶ
ナ2	ナースコール	1set
ス1	処置灯スイッチ	1ヶ
ス3	照明スイッチ	1ヶ

△					第三角法	担当	年月日	尺度	名称	医療ガス：セントラルユニ製くNSVタイプ>用_【UC-1C】	工事名称	-
△						製図	黒田	'24.7.1		左側－医療ガス・タイプ	図番	DWC2000201
△						検図	近藤	〃		メディカルコンソールく横型・壁面外付タイプ>	株式会社 中部コーポレーション	
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	近藤	〃	(A3)	【UC-1C】くサイズ：123x90(10+80) L=1300>		

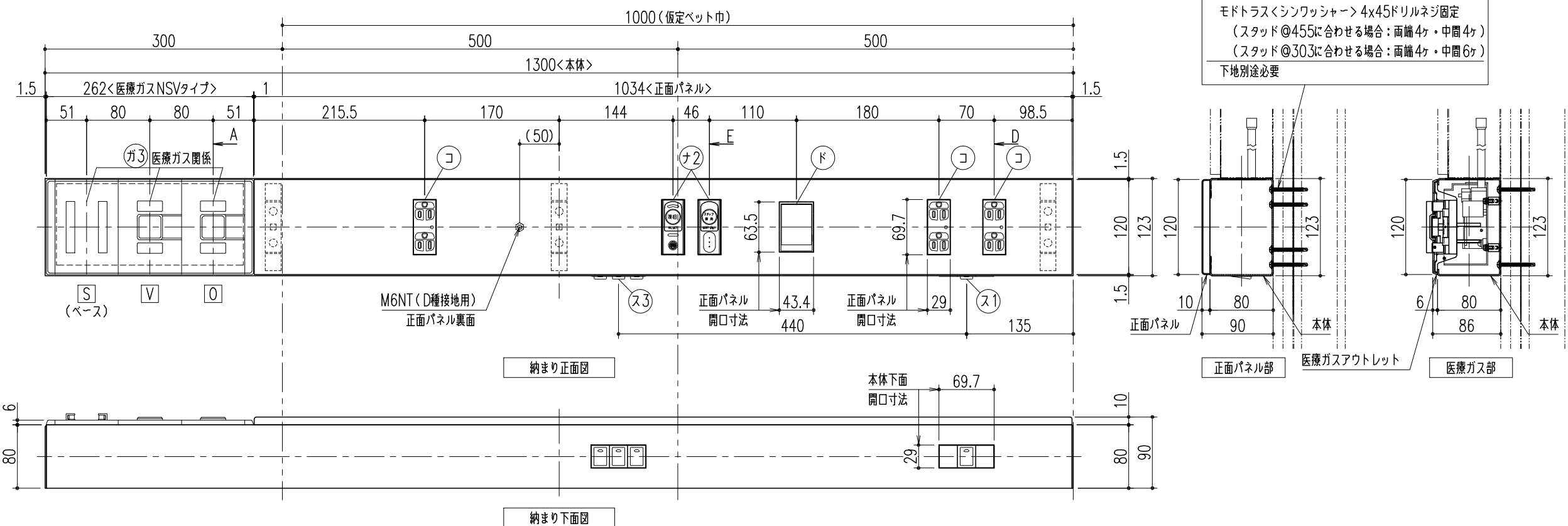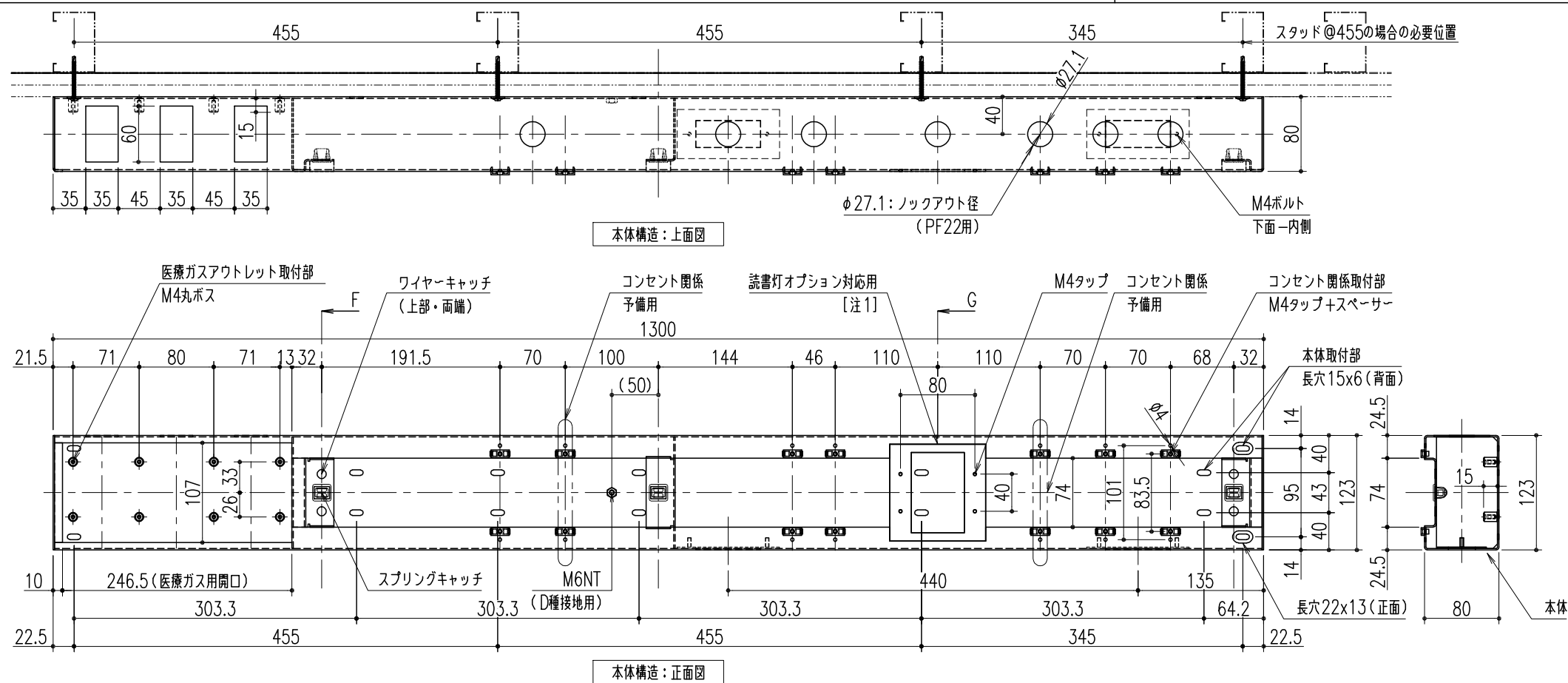

左側－医療ガス部：SVO（3ヶ）型
S・セントラルユニ製＜NSVタイプ＞：スライドベース

材質：鋼板製
 本体：PL-1.6t ・ 正面パネル：PL-1.2t
 表面処理：アクリル樹脂焼付塗装
 色、艶：＜日塗工＞、＜分艶＞
 物件毎に指定（単色のみ）※御指示下さい

■正面パネル、本体、のみ中部コーポレーションにて製作となります。

■医療ガス関係
※医療ガス取付部、M4丸ボス位置と開口サイズと仕様の確認が必要です。

■オプション
※予備用コンセント使用時の正面パネルは別製作になります。

※読書灯はくパナソニック製LGB71591LE1>
が取付できる仕様です〔注1〕

■本体ロックアウト径
※φ27.1（PF22用）は御指示により
φ21.5（PF16用）他に対応可能です。



詳細図番
DWC2000205
DWC2000206
DWC2000207

○	対応 設備	個数
ガ3	医療ガス関係	一式
コ	医療コンセント	3ヶ
ナ2	ナースコール	1set
ス1	処置灯スイッチ	1ヶ
ス3	照明スイッチ	1ヶ
ド	読書灯	1ヶ

モドトラスクシンワッシャー> 4x45ドリルネジ固定
(スタッド@455に合わせる場合: 両端4ヶ・中間4ヶ)
(スタッド@303に合わせる場合: 両端4ヶ・中間6ヶ)
下地別途必要

■ 本体施工詳細



※本図は、「左側-医療ガス タイプ」を示します。
「右側-医療ガス タイプ」は、左右反転になります。

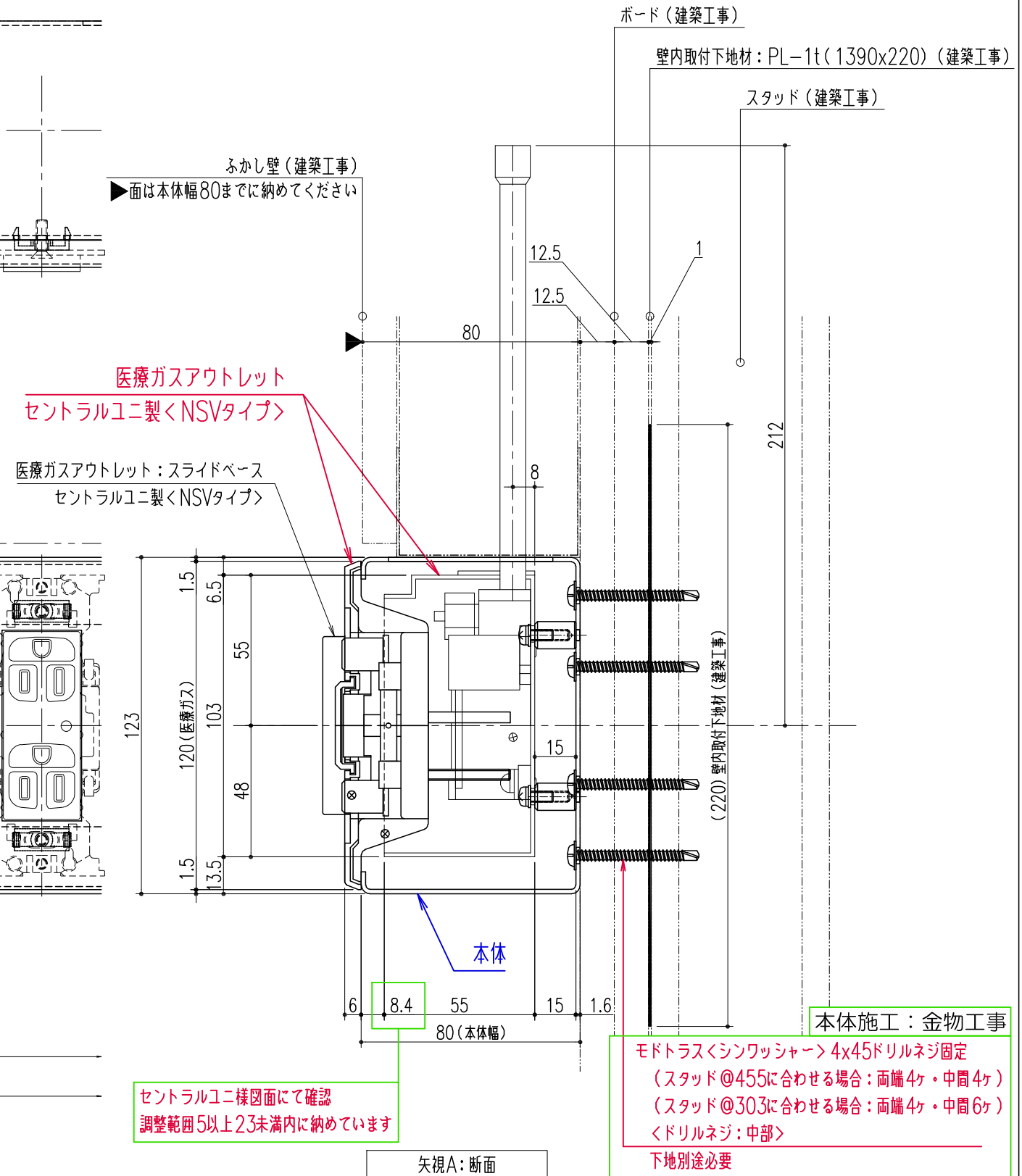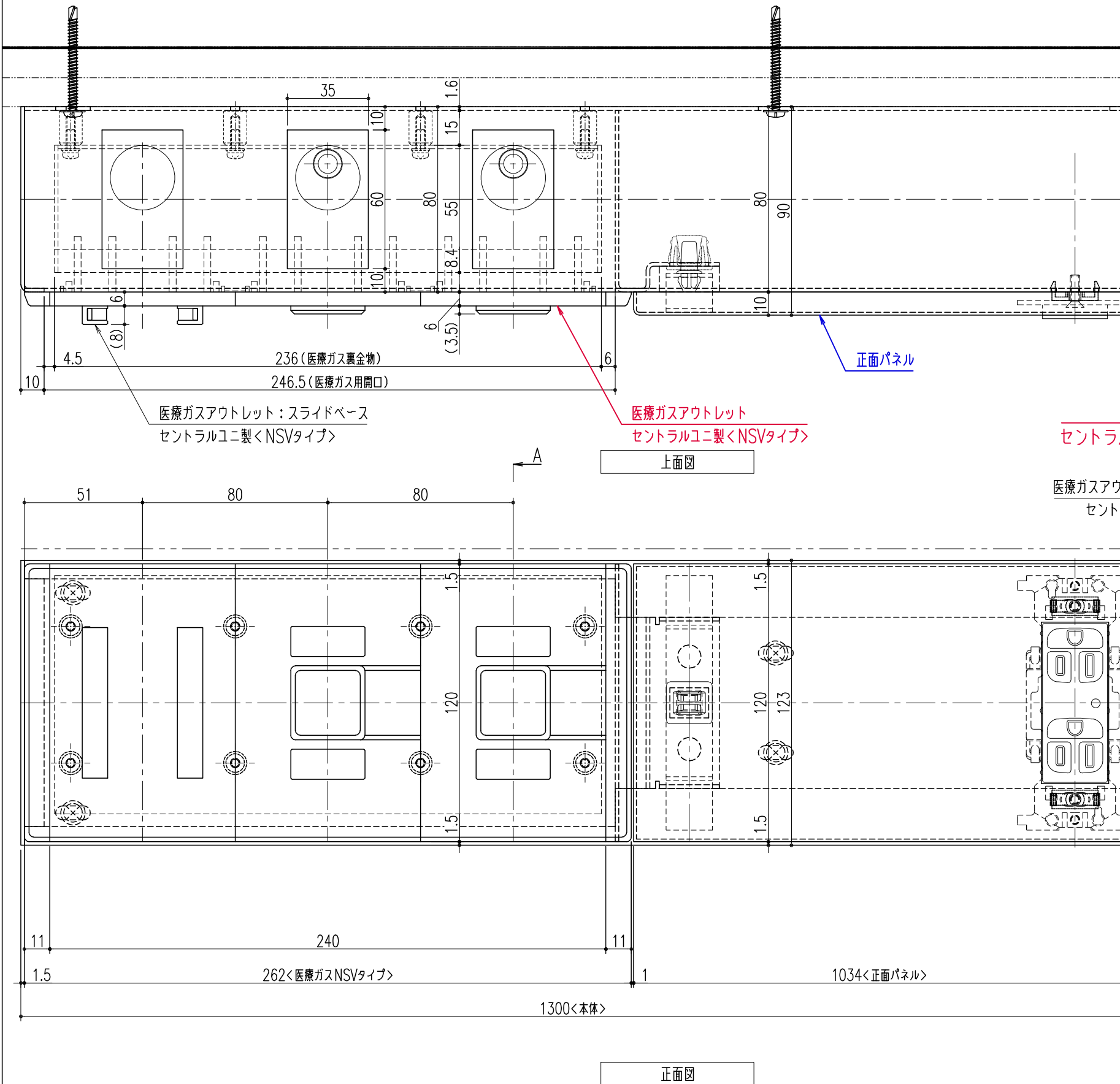

医療ガスアウトレット施工：設備工事

△					第三 角 法	担 当 年 月 日 尺 度	名 称	医療ガス：セントラルユニ製くNSVタイプ>用_【UC-1C】	工事名称	-		
△								製 図	黒田	'24.7.1	図 番	DWC2000205
△								検 図	近藤	〃		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認				承 認	近藤	〃		
									株式会社 中部コーポレーション			


■医療ガス関係：セントラルユニ製<NSVタイプ>（医療ガス部）詳細図・御確認事項・取付手順②

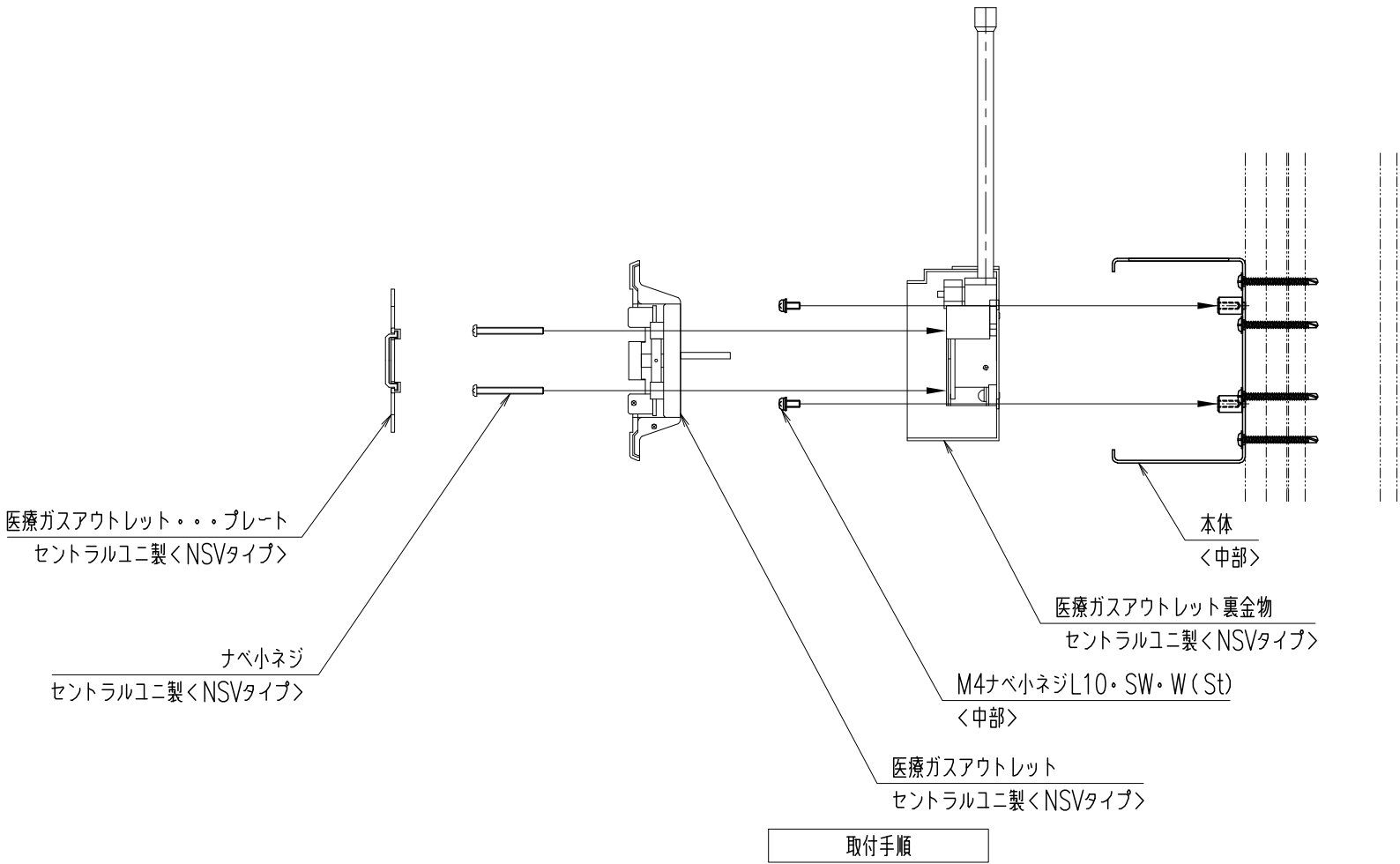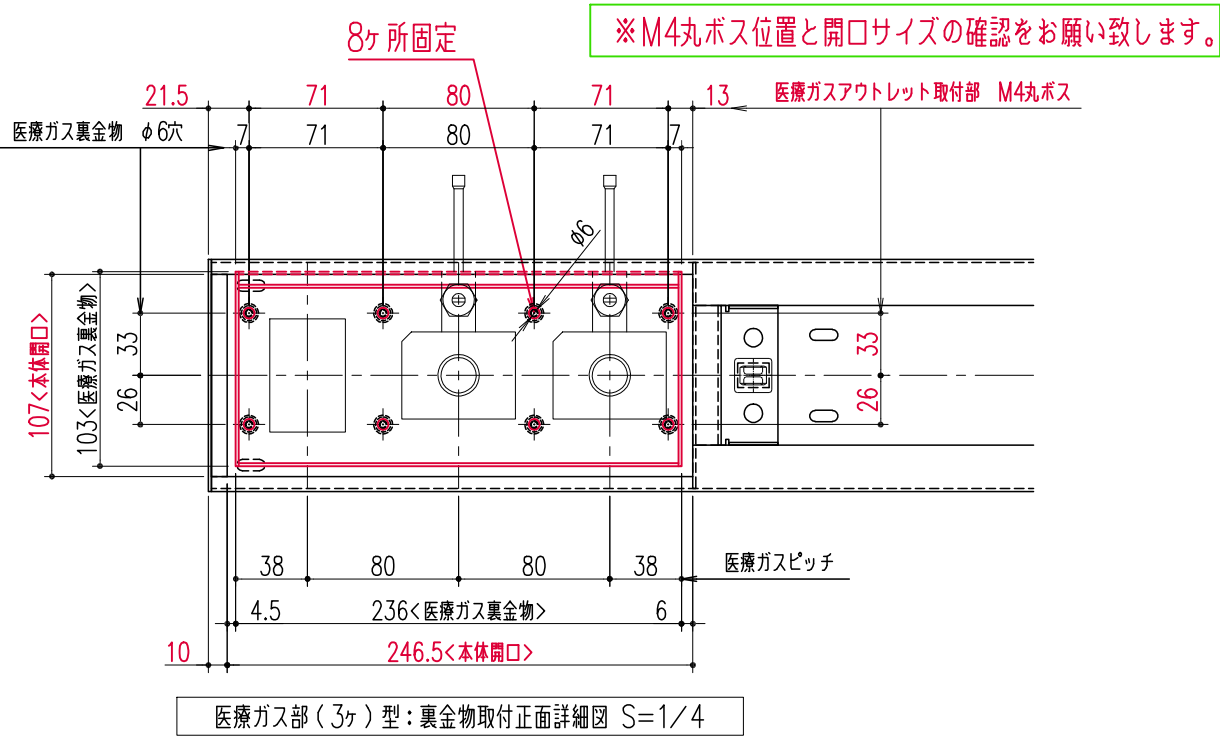

医療ガスアウトレット施工：設備工事


△					第	担	年	尺	名	医療ガス：セントラルユニ製<NSVタイプ>用_【UC-1C】	工事名称	-
△					三	製	月	度	称		図	番
△					角	図	日	1/2		メディカルコンソール<横型・壁面外付タイプ>		
記	変更内容・理由	年	月	日	法	検		(A3)	品	【UC-1C】<サイズ：123x90(10+80)L=1300>	株式会社	中部コーポレーション
号					承認	承認						

■コンセント部断面
■本体底面スイッチ部断面

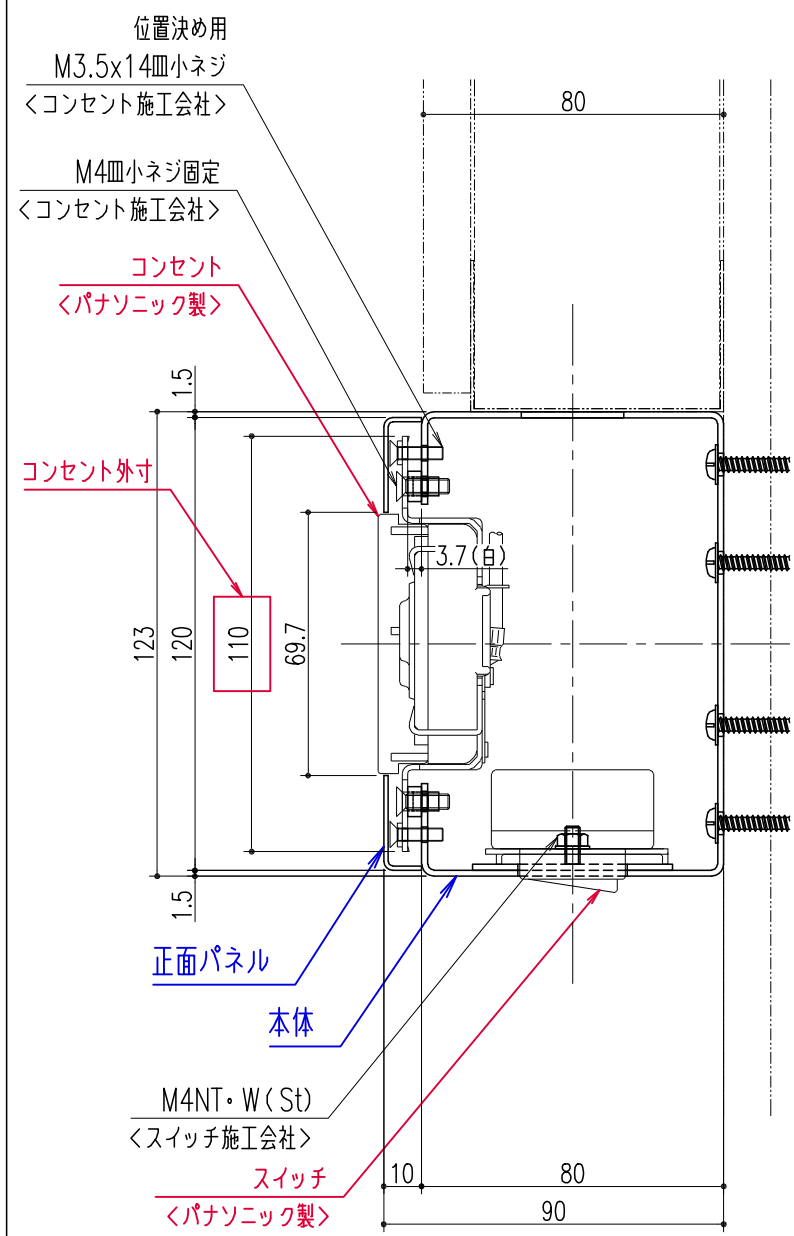

矢視D：断面
コンセント施工：設備工事
スイッチ施工：設備工事


■ナースコール部断面

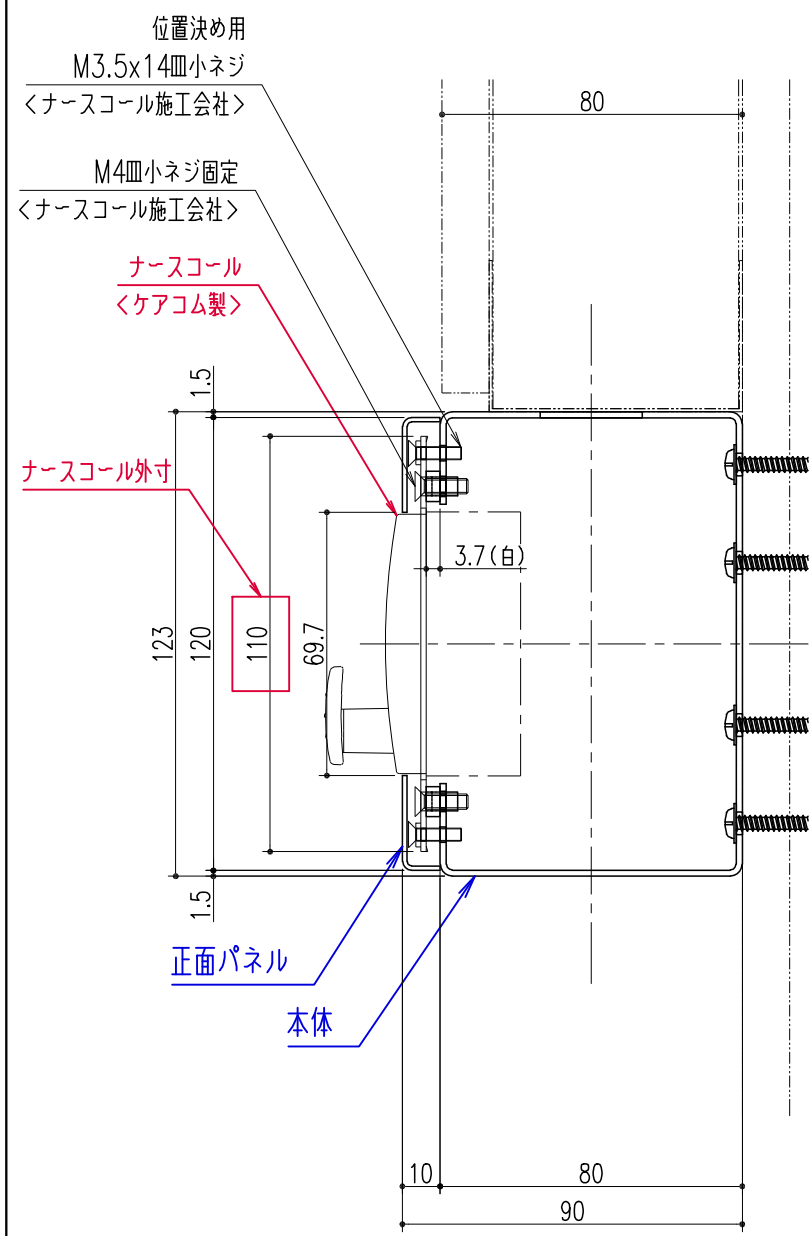

矢視E：断面
ナースコール施工：設備工事


■正面パネル固定部断面

■ワイヤーキャッチについて
※付属品になります。
※設備の取付けがすべて完了致しましたら
付属の施工要領書を参照の上、ワイヤーキャッチを取付
て正面パネルをはめこんで下さい。

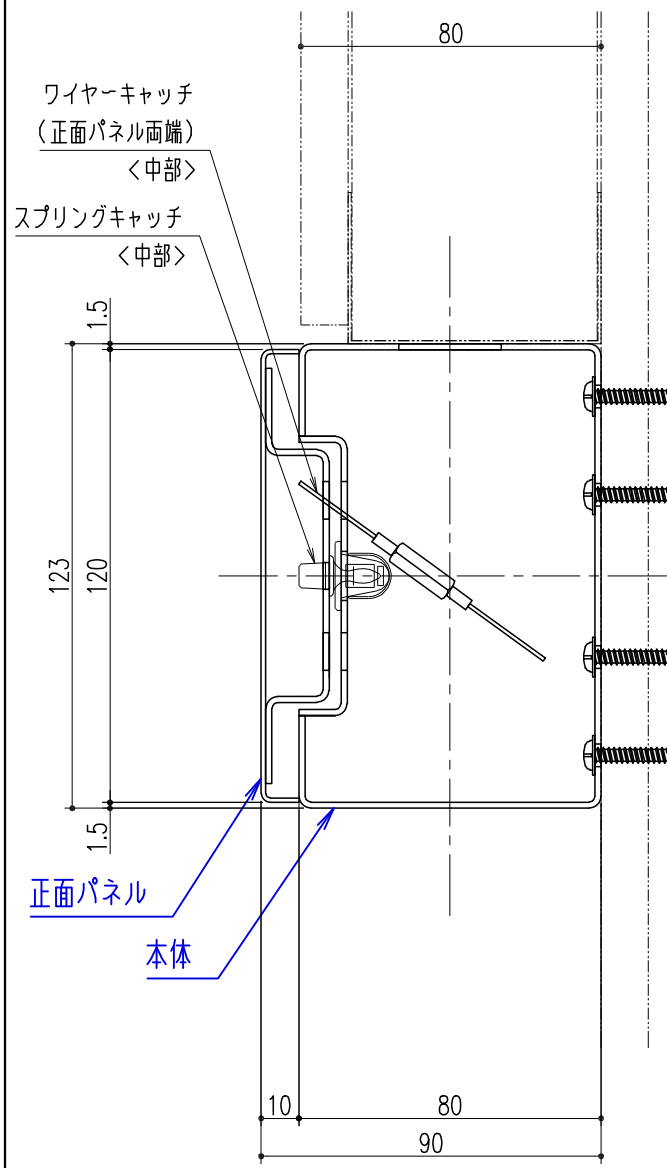

矢視F：断面
正面パネル施工：設備工事

■読書灯部断面
(オプション対応用)

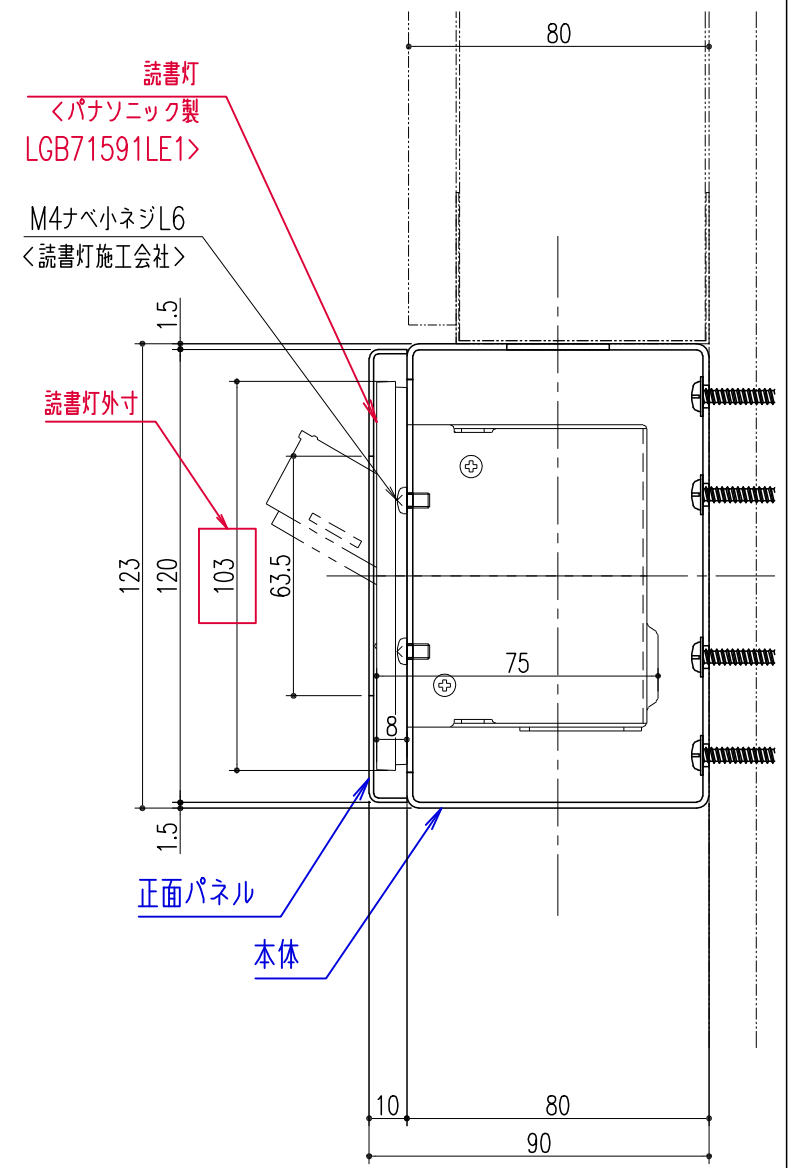

矢視G：断面
読書灯施工：設備工事

△					第	担	年	尺	名	医療ガス：セントラルユニ製<NSVタイプ>用_【UC-1C】	工	-
△					三	当	月	度	称		事	
△					角		日	1/2		メ	名	
記	号	変更内容・理由	年	月	日	担	当	承認	法	検	品	株式
										図	名	中
										承		部
										認		コー
												ポ
												レー
												シ
												ョ
												ン